

Инструкция по применению

Пластина-полукольцо VARIMATE (ВАРИМЕЙТ) адгезивная для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, тонкая 3×11 см, тонкая 5×11 см, тонкая изогнутая 3×9 см.

Описание изделия

Пластины-полукольца являются нестерильными гидроколлоидными пластинами-полукольцами, покрытыми сверху полиуретановой дышащей пленкой. В состав пластин-полуколец входят пектин, желатин, карбоксиметилцеллюлоза, полиизобутилен. В составе пластин-полуколец отсутствуют такие материалы, как латекс и другие синтетические примеси.

Назначение медицинского изделия

Изделие предназначено для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников.

Показания

Изделия показаны пациентам с наличием стомы или фистулы для дополнительной фиксации внешних краёв пластины калоприемников и уроприемников.

Использование с адгезивами калоприемников/уроприемников:

1. Влага и высокая температура (например, во время плавания) могут повлиять на фиксацию адгезивной пластины. Использование полуколец препятствует отклеиванию адгезива и помогает фиксировать пластину калоприемника.
2. Когда адгезив пластины снова высыхает, использование полуколец способствует сохранению им липких качеств без дальнейшей травматизации кожи вокруг стомы.

Меры предосторожности

При возникновении раздражения, прекратите использование и обратитесь к вашему медицинскому специалисту. Не используйте какие-либо масла или маслянистые субстанции для очищения кожи, в противном случае, пластины-полукольца не будут приклеиваться. Не используйте масло или жирные продукты, например, лосьон для тела в процессе использования пластин-полуколец. Изделие предназначено только для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.

Способ применения

Подготовка

Выберите подходящий размер и форму пластины-полукольца. Пластины-полукольца должны перекрывать внешний край адгезивной пластины минимум на 1,5-2 см.

Наложение

Очистите кожу вокруг стомы теплой водой с нейтральным мылом. Аккуратно просушите. Наложите на кожу пластину калоприемника/уроприемника однокомпонентной или двухкомпонентной системы по уходу за стомой согласно инструкции по применению, поставляемой с данными системами. Поверх внешних краёв пластины калоприемника/уроприемника наложите пластины-полукольца Varimate. Разгладьте возможные неровности. Прижимайте к телу пластины-полукольца Varimate около 30 секунд. Пластины-полукольца лучше приклеиваются, если кожа слегка влажная. Предварительный нагрев не требуется. При использовании двухкомпонентных систем по уходу за стомой, присоедините сборный мешок к пластине калоприемника/уроприемника для завершения процедуры наложения.

Удаление



Придерживая кожу, аккуратно удалите пластину-полукольцо с кожи. Новая пластина-полукольцо может накладываться на остатки на коже от ранее использованной.

Частота замены

Замена пластины-полукольца осуществляется в соответствии с рекомендациями медицинского специалиста, индивидуальными особенностями стомированного пациента, а также типом Средств реабилитации для стомического использования, совместно с которыми применяется пластина-полукольцо.

Утилизация

После применения изделие утилизируется как отходы класса А или вместе с бытовыми отходами.

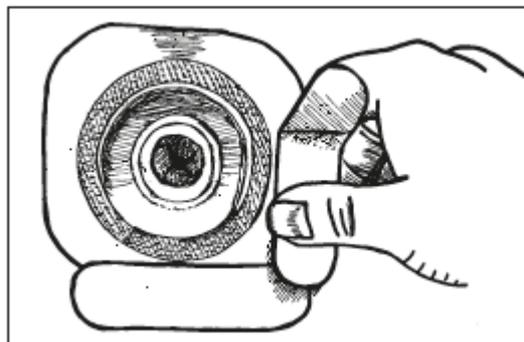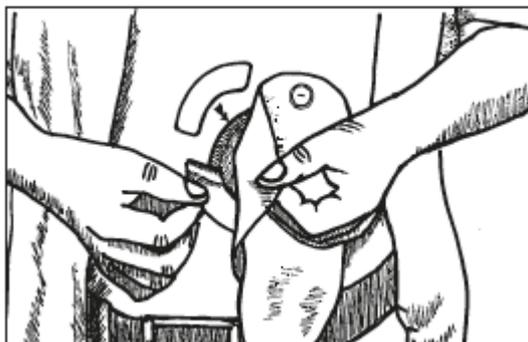




Держать вдали от источников тепла



Беречь от влаги

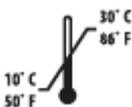

Температурный диапазон



Не используйте повторно



Внимание: обратитесь к инструкции по применению



Дата производства



Производитель



Использовать до



Код партии



Номер по каталогу



Бытовые отходы



Медицинское изделие

О любых серьезных инцидентах следует сообщать производителю infomail@convatec.com