



Инструкция по применению медицинского изделия Канюли носовые (назальные) для подачи кислорода Unomedical (Уномедикал)

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7758 от 30.10.2018. Срок действия - бессрочно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Канюли носовые (назальные) для подачи кислорода Unomedical (Уномедикал) предназначены для доставки кислорода к пациенту во время кислородной терапии. Канюли используются в условиях стационара (в медицинском учреждении) - в отделениях реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии исключительно квалифицированным медицинским персоналом со специальной подготовкой. Изготовлено в режиме «чистых помещений». Нетоксично!

ОПИСАНИЕ

Канюля назальная для подачи кислорода Соф-Тач (Sof-Touch) с несминаемой трубкой и универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и Канюля назальная для подачи кислорода стандартная с несминаемой трубкой, с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) состоит из легкой петлевой трубки, на назальной части которой имеются два зубца. Канюлю размещают таким образом, чтобы зубцы на назальной части были обращены в носовые ходы, через них и происходит подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента. Бегунок на петлевой трубке служит для фиксации канюли под подбородком пациента. Петлевая трубка неразрывно соединена с более жесткой кислородной трубкой через трехходовой коннектор. Универсальный коннектор Fits-All кислородной трубки соединяется с источником кислорода, таким как портативный генератор кислорода или настенный коннектор для централизованной подачи в клинику. Универсальный коннектор Fits-All разработан для подсоединения ко всем видам кислородных флоуметров без использования различных адаптеров.

Канюля назальная для подачи кислорода Мак-Сейф (MAC Safe) с несминаемой трубкой, с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All), с портом для мониторинга CO₂ состоит из легкой петлевой трубки, на назальной части которой имеются два зубца. Канюлю размещают таким образом, чтобы зубцы на назальной части были обращены в носовые ходы, через них и происходит подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента. Бегунок на петлевой трубке служит для фиксации канюли под подбородком пациента. Петлевая трубка через четырехходовой коннектор неразрывно соединена с двойной трубкой, состоящей из кислородной трубки и порта для мониторинга CO₂. Универсальный

коннектор Fits-All кислородной трубки соединяется с источником кислорода, таким как портативный генератор кислорода или настенный коннектор для централизованной подачи в клинику. Коннектор Луер порта для мониторинга CO₂ соединяется с датчиком аппарата ИВЛ. Кислородный адаптер используется в тех случаях, когда необходимо подключение к коннектору с диаметром 22 мм.

Канюли для новорожденных, с прямой носовой частью, длиной 2.1 м в зависимости от размера ноздрей также могут использоваться для младенцев и/или недоношенных детей.

Варианты исполнения:

1. Канюля назальная для подачи кислорода Соф-Тач (Sof-Touch) с несминаемой трубкой и универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All):

- для взрослых, с изогнутой носовой частью, длиной 2.1 м, 4.2 м (артикулы: 93-318MM, 93-319MM).

- для взрослых, с прямой носовой частью, длиной 4.2 м (93-319MM).

- для взрослых, для подачи кислорода с высокой скоростью, с изогнутой носовой частью, длиной 2.1 м (артикул: 93-314HFMM).

- педиатрическая, с изогнутой носовой частью, длиной 2.1 м (артикул: 93-332MM).

- для новорожденных, с прямой носовой частью, длиной 2.1 м (артикул: 93-337MM).

- для недоношенных, с прямой носовой частью, длиной 2.1 м (артикул: 93-338MM).

2. Канюля назальная для подачи кислорода Мак-Сейф (MAC-Safe) с несминаемой трубкой, с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All), с портом для мониторинга CO₂:

- педиатрическая, с изогнутой носовой частью, с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), длиной 3м, в комплекте с кислородным адаптером (артикулы: 93-362MM, 93-363MM).

- для взрослых, с изогнутой носовой частью, с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), длиной 3м, в комплекте с кислородным адаптером (артикулы: 93-368MM, 93-369MM).

3. Канюля назальная для подачи кислорода стандартная с несминаемой трубкой, с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All):

- для взрослых, с изогнутой широкой носовой частью, длиной 3 м (артикул 93-308MM).

- для взрослых, с прямой носовой частью, длиной 2.1 м, 4.2 м (артикулы: 93-312MM, 93-314MM).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не зарегистрировано. Целесообразность применения кислородной терапии, показаний и противопоказаний для проведения процедуры определяется лечащим врачом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Изделие предназначено только для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению. Изделия с поврежденной упаковкой не применимы к использованию. Изделия с истекшим сроком годности не следует использовать для пациентов, они подлежат утилизации. Носовая канюля обычно используется в ситуациях, требующих небольшого количества кислорода, без жесткого контроля дыхания, таких как оксигенотерапия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Откройте упаковку и извлеките изделие.
2. Вставьте канюлю в ноздри пациента.
3. Зафиксируйте изделие над ушами и под подбородком пациента.
4. Аккуратно зафиксируйте канюлю путем движения бегунка до тех пор, пока носовая канюля не будет правильно установлена.
5. Прикрепите увлажнитель к источнику кислорода (при необходимости).
6. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику кислорода или увлажнителю и отрегулируйте скорость потока до уровня, предписанного врачом.
7. Убедитесь в движении потока кислорода по всему устройству.
8. Присоедините коннектор Луер к устройству мониторинга CO₂ (при необходимости подключения разъема изделия к источнику кислорода с 22-мм коннектором, воспользуйтесь кислородным адаптером, который поставляется в упаковке с канюлей).
9. Изделие предназначено только для одноразового применения.
10. Изделие не разрешается использовать, если упаковка повреждена.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды: от +10°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия чрезмерно высоких и низких температур, влаги, прямых солнечных лучей.

Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте изделие после его использования согласно процедурам, принятым в лечебном учреждении.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 Номер по каталогу	 Запрет на повторное применение !	 Производитель	 Не стерильно	 Уполномоченный представитель в Европе
 Не содержит натуральный латекс	 Номер партии	 Знак CE-марки	 См. инструкцию по применению	 Срок хранения (использовать до)
 Знак соответствия при декларировании соответствия	 Не содержит фталаты	 Не использовать при повреждении упаковки	 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd./Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд

Адрес: No.138, BinHaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, 315336, P.R.China/№ 138 Бинхайси Род, Ханчжоу Бэй Нью Зоун, 315336, г. Нинбо, провинция Чжэцзян. Китай

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94. За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8 800 200 80 99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00